



# Gondola AMPS-Therapie

für Gang- und  
Gleichgewichtsstörungen aufgrund  
neurologischer Erkrankungen

Move better, live better



# UNABHÄNGIGKEIT ZURÜCKGEWINNEN

Die AMPS (Automated Mechanical Peripheral Stimulation) ist eine Heimtherapie für neurologische Störungen, wie Parkinson, periphere Neuropathie und Schlaganfall.

Die Therapie wird mit dem Gondola Home®-Gerät durchgeführt und verbessert Gang- und Gleichgewichtsstörungen, reduziert das Freezing (FOG) und das Sturzrisiko. Bereits nach einer Sitzung kann eine Verbesserung der Mobilität der Patienten beobachtet werden, und bei regelmäßiger Anwendung des Geräts alle zwei bis drei Tage können langfristige Vorteile erzielt werden.



MOTORENBLÖCKE



BRADYKINESIE



STEIFHEIT



FREEZING




STURZGEFAHR



# WIRKUNGSMECHANISMUS

Die Gondola-AMPS Therapie ist für eine regelmäßige und lebenslange Anwendung konzipiert und ist mit pharmakologischen Behandlungen, Herzschrittmacher oder Tiefenhirnstimulation (DBS) für Parkinson-Patienten kompatibel. Die Therapie dauert 2 Minuten und besteht aus Druckstimulationen an zwei bestimmten Punkten beider Füße. Die AMPS-Stimulation verstärkt die funktionelle Konnektivität zwischen den Gehirnbereichen, die an der motorischen Kontrolle beteiligt sind, und verbessert das Gehen und das Gleichgewicht. Die Wirkung der Therapie ist unmittelbar nach der Behandlung spürbar und kann einige Tage andauern. Ein Gondola® Home-Gerät wird auf der Grundlage der Eigenschaften des Patienten konfiguriert, um sicherzustellen, dass die Therapie bei der Anwendung zu Hause richtig abgegeben wird.

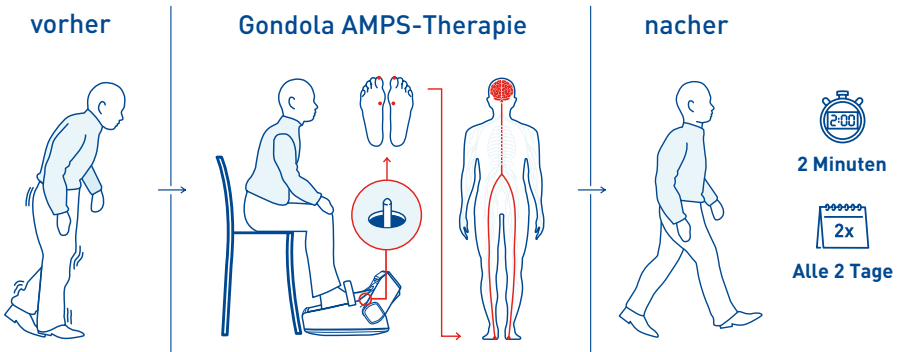

PATIENTENVIDEO:  
[bit.ly/Gondola-PK](https://bit.ly/Gondola-PK)



# VORTEILE



**SCHNELL**  
2 Minuten,  
alle 2 Tage



**SOFORTIG**  
Die Verbesserungen  
sind direkt nach der  
Therapie spürbar



**ZU HAUSE**  
Die Therapie kann  
bequem zu Hause  
durchgeführt werden



**WISSENSCHAFTLICH**  
Durch klinische  
Studien validiert



**12 WISSENSCHAFTLICHE  
VERÖFFENTLICHUNGEN**





## ERGEBNISSE



**VERBESSERTES  
GEHEN**




**BESSERES  
GLEICHGEWICHT**



**GERINGERE  
STURZGEFAHR**



**VERBESSERTES  
DUAL-TASKING**

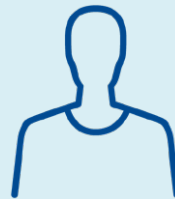

**+3500 BEHANDELTE  
PATIENTEN**

# WISSENSCHAFTLICH UNTERSTÜTZT



Gondola Medical Technologies verpflichtet sich, unvoreingenommene wissenschaftliche Beweise für die Wirksamkeit der Gondola AMPS-Therapie vorzulegen. Die Sicherheit und die Vorteile der Behandlung wurde in klinischen Forschungsstudien mit über 250 Parkinson-Patienten dokumentiert. Die Studien zeigten, dass bei regelmäßiger Anwendung eine erhöhte Gehgeschwindigkeit, ein schnelleres Aufstehen und Gehen (TUG), eine größere Schrittlänge, ein symmetrischeres Gangbild, eine verbesserte Drehfähigkeit und Verbesserungen des dynamischen Gleichgewichts beobachtet werden konnten.

## BEWEGUNG ZURÜCKGEWINNEN MIT AMPS

1

### **KONTAKTIEREN SIE UNS:**

Für eine erste Einschätzung per Telefon oder E-Mail.

2

### **BUCHEN SIE EINEN TERMIN:**

Wir empfehlen 2 Bewertungsbesuche für Patienten

3

### **PROBIEREN SIE DIE AMPS-THERAPIE IN EINEM PARTNERZENTRUM**

4

### **BEWERTUNG DER ERGEBNISSE**

5

**SCANNEN DER FÜSSE IM PARTNERZENTRUM,**  
um personalisierte Einlegesohlen vorzubereiten.

6

**HOLEN SIE SICH IHR  
EIGENES GERÄT**

7

**SETZEN SIE DIE THERAPIE  
ZU HAUSE FORT**




# GONDOLA MEDICAL TECHNOLOGIES

Gondola Medical Technologies ist ein innovatives MedTech-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz.

Das Unternehmen setzt sich dafür ein, die Gondola AMPS-Therapie zum Standard für die Behandlung von Geh- und Gleichgewichtsstörungen aufgrund neurologischer Erkrankungen zu machen, insbesondere bei Parkinson-Krankheit, Schlaganfall und CIPN-Rehabilitation.

Derzeit können Patienten das Gerät in bestimmten spezialisierten Partnerzentren erhalten.

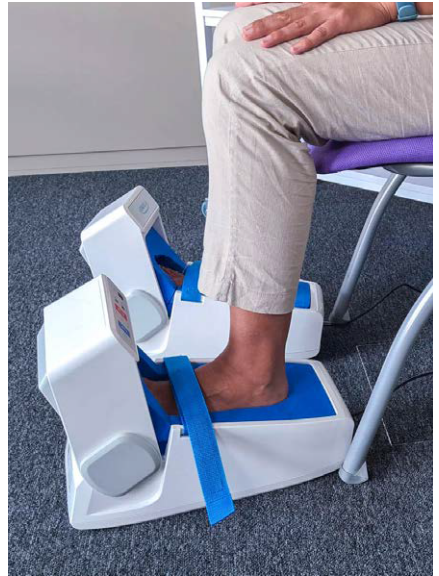

# FAQs

1.

**Nach wie vielen Sitzungen kann ich die Effekte der Gondola AMPS-Therapie bemerken?**

Patienten, die für die Behandlung geeignet sind, erfahren ab der ersten Anwendung eine sofortige Verbesserung, die mehrere Tage dauern kann. Durch regelmäßige Wiederholung der Gondola AMPS-Therapie können die Vorteile langfristig aufrechterhalten werden. Um konsistente Ergebnisse zu gewährleisten, wird empfohlen, das Gerät zweimal im Jahr im dafür vorgesehenen Partnerzentrum neu zu kalibrieren.

2.

**Kann ich die Therapie regelmäßig in einem Ihrer Partnerzentren durchführen, ohne das Gerät kaufen zu müssen?**

Wir planen keine regelmäßigen Sitzungen in den Zentren, da zur Aufrechterhaltung der Vorteile eine kontinuierliche Wiederholung der Behandlung alle 2-3 Tage erforderlich ist. Eine solche Vorgehensweise wäre im Vergleich zum Kauf des Gondola®-Geräts und dessen Verwendung zu Hause weder durchführbar noch wirtschaftlich attraktiv.

3.

**Ist die Therapie mit dem Gondola Home®-Gerät die gleiche, die ich im Partnerzentrum vom Therapeuten erhalten habe?**

Das Gondola® Professional-Gerät, das in Partnerzentren erhältlich ist, und das Gondola® Home-Gerät haben dieselbe Elektronik und liefern dieselbe AMPS-Therapie. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Gondola® Home-Gerät mit einer maßgefertigten Einlegesohle geliefert wird, die eine unabhängige Verwendung zu Hause ermöglicht.

4.

**Kann ich während der AMPS-Therapie die Medikamenteneinnahme abbrechen?**

Nein, Gondola® AMPS ist eine ergänzende Therapie, und um die Ergebnisse zu maximieren, ist es wichtig, die verschriebenen Behandlungen gemäß den Anweisungen Ihres Arztes zu befolgen.

5.

**Sollte ich gehen, während ich das Gondola®-Gerät trage?**

Nein, das Gondola Home®-Gerät soll zwei- bis dreimal pro Woche für etwa zwei Minuten im Sitzen angewendet werden.



6.

**Können zwei verschiedene Patienten mit ähnlichen Störungen das gleiche Gerät verwenden?**

Nein, das Gondola® Home-Gerät wird mit einer Einlegesohle geliefert, die dem Fußbild des Patienten angepasst ist, um eine automatische und sichere Therapie zu gewährleisten. Diese Anpassung ermöglicht nicht die Verwendung des gleichen Geräts durch zwei verschiedene Personen.

7.

**Kann das Gondola Home®-Gerät auf Reisen im Flugzeug mitgenommen werden?**

Ja, das Gondola Home®-Gerät kann im Flugzeug im Gepäckfach mitgenommen werden. Beim Kauf wird es in einer kleinen Tragetasche geliefert, die man für die Reise verwenden kann. Das leichte und praktische Design des Geräts ermöglicht es Ihnen, es überallhin mitzunehmen.

8.

**Gibt es Krankheiten oder Zustände, für die die Gondola AMPS Therapie nicht empfohlen wird?**

Die Behandlung kann nicht durchgeführt werden, wenn in den Stimulationsbereichen (am großen Zeh und am Mittelfußknochen der Füße) folgende Zustände vorliegen: Geschwüre, Hautverletzungen, Amputationen oder bei kürzlich aufgetretenen Knochenbrüchen, schwerer diabetischer Gefäßkrankheit oder Gichtgelenkerkrankungen. Die Therapie ist nicht für Patienten mit chronischer geistiger Behinderung, konsolidierter Demenz oder kognitiven Defizit, schweren Herzerkrankungen und Psychopathologien angezeigt. Außerdem erhalten Patienten mit Multipler Sklerose oder ALS keinen Nutzen davon.

9.

**Bieten Sie Garantien und Service nach dem Kauf?**

Für das Gondola Home®-Gerät gilt die gesetzliche 2-Jahres-Garantie für Konformitätsmängel ab Lieferdatum. Es gibt keine weiteren Garantien. Unser Kundenservice steht für After-Sales-Unterstützung zur Verfügung

# KOOPERATIONEN



**Mount  
Sinai**



San Raffaele



**UNIKLINIK  
KÖLN**





**PARTNER**




**INNOVAUD** 



**venturelab**

**UNTERSTÜTZT VON**



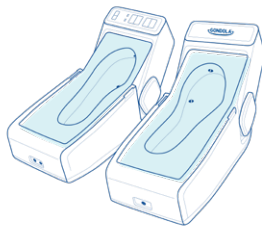

Gondola Medical Technologies

Lausanne - Stabio

SCHWEIZ

CH +41 91 921 3838

IT +39 02 97070 465

FR +33 1 87 21 07 40

[info@gondola-medical.com](mailto:info@gondola-medical.com)

[www.gondola-medical.com](http://www.gondola-medical.com)

BRC-GH-DE

2023/1.0a

**GONDOLA**<sup>®</sup>