



# Thérapie Gondola AMPS

pour les problèmes de marche et  
d'équilibre causés par des troubles  
neurologiques

Move better, live better

**GONDOLA**<sup>®</sup>

# RETROUVER SON INDÉPENDANCE

La thérapie Gondola AMPS (Automated Mechanical Peripheral Stimulation) est une thérapie à domicile pour les troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson, la neuropathie périphérique et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). La thérapie délivrée par Gondola® Home améliore les problèmes de motricité et d'équilibre, réduit les blocages et le risque de chutes. Une seule séance permet d'améliorer immédiatement la mobilité des patients et l'utilisation régulière du dispositif tous les deux ou trois jours donne des effets bénéfiques à long terme.



BLOCS MOTEURS



BRADYKINÉSIE



RIGIDITÉ



FREEZING



RISQUE DE CHUTE




# MÉCANISME D'ACTION

La thérapie Gondola AMPS, conçue pour une utilisation régulière chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, est compatible avec les traitements médicamenteux, le stimulateur cardiaque ou la stimulation cérébrale profonde (SCP - DBS).

La thérapie prend 2 minutes, pendant lesquels des stimuli de pression sont appliqués sur deux points spécifiques de chaque pied.

La stimulation AMPS permet d'augmenter la connectivité fonctionnelle entre les zones du cerveau dédiées à la motricité et responsables de la marche et de l'équilibre. Les bénéfices sont immédiatement appréciables après la thérapie et peuvent durer quelques jours.

Afin d'assurer une stimulation correcte à domicile, le dispositif Gondola® Home est configuré en fonction des caractéristiques du patient.

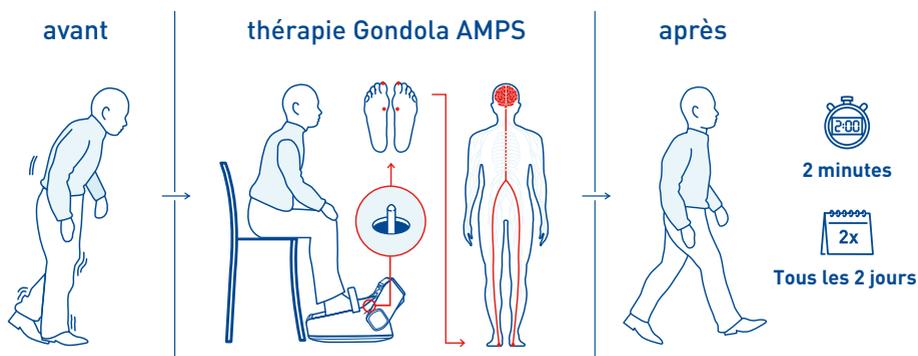

VIDÉO DE PATIENTS : [bit.ly/Gondola-MP](https://bit.ly/Gondola-MP)



# BÉNÉFICES



## **RAPIDE**

2 minutes,  
tous les 2 jours



## **IMMÉDIATE**

Les améliorations sont  
visibles immédiatement  
après la thérapie



## **À DOMICILE**

La thérapie peut être  
effectuée confortablement  
à la maison



## **SCIENTIFIQUE**

Validée par des  
études cliniques



**12 PUBLICATIONS  
SCIENTIFIQUES**





## RÉSULTATS



**AMÉLIORATION  
DE LA MARCHÉ**




**AMÉLIORATION  
DE L'ÉQUILIBRE**



**RÉDUCTION DU  
RISQUE DE CHUTE**



**AMÉLIORATION  
DE LA MARCHÉ EN  
DOUBLE TÂCHE**

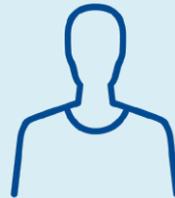

**PLUS DE 3500  
PATIENTS TRAITÉS**

# CONFIRMÉ PAR LA SCIENCE



Gondola Medical Technologies s'engage à produire des preuves scientifiques objectives de l'efficacité de la thérapie Gondola AMPS. La sécurité et les bénéfices du traitement ont été documentées dans des études cliniques réalisées auprès de plus de 250 patients atteints de la maladie de Parkinson. Ces études indiquent qu'une utilisation régulière du dispositif permet d'obtenir une vitesse de marche accrue, un lever-marcher chronométré (TUG) plus rapide, une longueur de pas supérieure, une amélioration de la symétrie de la marche, un renforcement de la capacité à tourner et des progrès de l'équilibre dynamique.

## RETROUVER SA CAPACITÉ DE MOUVEMENT GRÂCE À GONDOLA® AMPS

- 1 **NOUS CONTACTER :**  
pour une évaluation initiale par téléphone ou courrier électronique.
- 2 **PRENDRE RENDEZ-VOUS :** il est recommandé que les patients fassent l'objet de deux visites d'évaluations.
- 3 **DÉCOUVRIR LA THÉRAPIE DANS UN CENTRE PARTENAIRE**
- 4 **ÉVALUER LES RÉSULTATS**
- 5 **SCANNER LES PIEDS AU CENTRE PARTENAIRE**  
pour préparer des semelles personnalisées.
- 6 **OBTENIR SON DISPOSITIF**
- 7 **CONTINUER LA THÉRAPIE À DOMICILE**

# GONDOLA MEDICAL TECHNOLOGIES

Gondola Medical Technologies est une entreprise MedTech innovante basée en Suisse.

L'entreprise a concentré ses efforts sur la rééducation de pathologies telles que la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, les neuropathies périphériques causées par la chimiothérapie et la paralysie cérébrale, dans le but de faire de l'AMPS une norme thérapeutique dans le traitement des problèmes de marche et d'équilibre.

Actuellement, les patients peuvent obtenir l'appareil dans des centres partenaires spécialisés.



# FOIRE AUX QUESTIONS

1.

**Au bout de combien de séances pourrai-je constater les bienfaits de la thérapie Gondola AMPS ?**

Les patients éligibles au traitement constatent une amélioration immédiate dès la première application, qui peut durer plusieurs jours. En répétant régulièrement la thérapie Gondola AMPS, il est possible de maintenir les bénéfices dans le temps. Pour garantir des résultats constants, il est recommandé de recalibrer l'appareil deux fois par an auprès du Centre Partenaire de référence."

2.

**Puis-je suivre régulièrement la thérapie dans l'un de vos Centres Partenaires sans obligation d'achat du dispositif ?**

Il n'y a pas de séances régulières prévues dans les centres car pour maintenir les bénéfices, il est nécessaire de répéter le traitement tous les 2/3 jours de manière continue, ce qui ne serait ni pratique ni économiquement intéressant par rapport à l'achat du dispositif Gondola® et à son utilisation à domicile.

3.

**La thérapie avec l'appareil Gondola® Home est-elle la même que celle reçue par le thérapeute du centre partenaire ?**

Le dispositif Gondola® Professional disponible dans les Centres Partenaires et le dispositif Gondola® Home ont la même électronique et dispensent la même thérapie AMPS. La seule différence est que le dispositif Gondola® Home est équipé d'une semelle personnalisée qui permet une utilisation autonome à domicile.

4.

**Puis-je arrêter la prise de médicaments tout en suivant la thérapie AMPS ?**

Non, Gondola® AMPS est une thérapie complémentaire, et pour maximiser les résultats, il est impératif de continuer à suivre les traitements recommandés par votre médecin traitant.

5.

**Le dispositif médical Gondola® est-il utilisé tout en marchant ?**

Non, le dispositif Gondola® Home a été conçu pour être utilisé en position assise, deux à trois fois par semaine. Ne déplacez pas, ne soulevez pas ou ne tournez pas le dispositif lors de son utilisation.

6.

**Est-ce que deux patients présentant des troubles similaires peuvent utiliser le même dispositif ?**

Non, le dispositif Gondola® Home est équipé d'une semelle réalisée fabriquée à l'image du pied du patient afin d'assurer une thérapie automatisée et simple. Cette personnalisation empêche l'utilisation du même appareil par deux personnes différentes.

7.

**Le dispositif Gondola® Home peut-il être transporté en avion lors d'un voyage ?**

Oui, le dispositif Gondola® Home peut être transporté en avion dans le compartiment à bagages à main. Lors de son achat, ce dispositif est fourni dans un sac de transport qui peut être utilisé pour voyager. La conception légère et pratique du dispositif Gondola® Home vous permet de l'emmener partout.

8.

**Existe-t-il des maladies ou des conditions pour lesquelles la thérapie Gondola AMPS n'est pas recommandée ?**

La thérapie ne peut pas être administrée si les zones de stimulation (les orteils et le métatarse des pieds) présentent des ulcères, des lésions cutanées, des amputations ou des fractures osseuses récentes. La thérapie n'est pas recommandée pour les patients souffrant de retard mental chronique, de démence consolidée ou de déficits cognitifs, de cardiopathies graves et de psychopathologies importantes. De plus, les patients atteints de sclérose en plaques et de SLA ne reçoivent aucun bénéfice du traitement.

9.

**Fournissez-vous des garanties et un service après-vente ?**

Le dispositif Gondola® Home est couvert par une garantie légale pour les défauts de conformité conformément à la législation en vigueur, pendant une durée de deux ans à partir de la date de livraison. Un service client dédié et un service après-vente sont disponibles.

# COLLABORATIONS



**Mount  
Sinai**



San Raffaele



**UNIKLINIK  
KÖLN**






## PARTENAIRES



## AVEC LE SOUTIEN DE



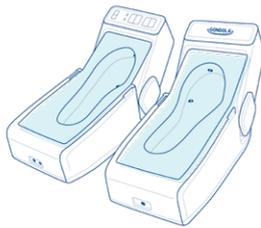

Gondola Medical Technologies  
Lausanne - Stabio  
SUISSE

CH +41 91 921 3838

IT +39 02 97070 465

FR +33 1 87 21 07 40

[info@gondola-medical.com](mailto:info@gondola-medical.com)  
[www.gondola-medical.com](http://www.gondola-medical.com)

BRC-GH-FR

2023/1.0a

**GONDOLA®**